

EXCEED

exceed the limits

# BALANÇA 'STEPON' COM VOZ INCLUÍDA



## MANUAL DO UTILIZADOR

## **AVISO**

Por favor não use esta balança numa superfície molhada ou escorregadia devido ao risco de queda.

## **CARACTERÍSTICAS**

- Peso máximo: 200 kg
- Divisões da escala: 0.1 kg
- Unidade: KG
- Dimensões do visor LCD: 100x50 mm
- Dimensões do aparelho: 360x300x31 mm
- Temperatura de utilização: 0-35°C
- Corrente Eléctrica:  $\leq 10\mu\text{A}$
- Pilhas: 4 x AAA

## **PILHAS**

4 x AAA (1.5 V). Verifique a posição “+”/“-” das pilhas para se certificar que estão instaladas correctamente.

## **UTILIZAÇÃO**

1. Antes da primeira utilização, recomendamos que faça o “reset” da balança para “0”.
2. Suba para cima da balança e ela vai automaticamente ligar-se.
3. Agora pode ficar na balança para se pesar, e o aparelho irá dizer “O SEU PESO É \*\*. \* KG”.
4. A balança irá desligar-se automaticamente ao fim de alguns segundos sem utilização.

## **MUDANÇA DE IDIOMA**

As balanças estão equipadas com os seguintes idiomas: Letão, Lituano, Estónio, Russo e Português. O idioma pré-definido da balança é o Letão. Para mudar de língua, prima o botão na parte de trás da balança.

## **LIGAR/DESLIGAR A VOZ**

Para desligar a voz, prima e mantenha premido o botão na parte de trás da balança. Irá ouvir um “bip” e a balança irá desligar-se. Agora a voz estará desligada. Para voltar a ligar a voz, prima e mantenha premido o botão na parte de trás da balança. Irá ouvir um “bip” e a balança irá desligar-se. Agora a voz estará de novo ligada.

## **INDICADOR**

A mensagem “Err” indica que a balança está em sobrecarga; por favor saia de cima da balança para evitar danos. O visor apresenta esse aviso se o peso estiver acima da capacidade máxima.

## **INDICADOR DE FALTA DE ENERGIA**

A mensagem “Lo” indica que a balança está com pouca energia, por favor substitua atempadamente as pilhas.

## **SUGESTÕES DE USO E MANUTENÇÃO**

1. Por favor coloque a balança numa superfície sólida e plana para garantir a sua precisão. Não a utilize em cima de uma carpete, por exemplo.
2. Note que é possível que haja variações de valores dentro da tolerância, uma vez que a balança não está calibrada para o uso médico profissional.
3. Limpe a balança com um pano húmido e mantenha-a seca. Não use detergentes abrasivos ou solventes químicos.
4. Não coloque nada em cima da balança quando ela não está a ser usada. Isso faz com que continue a gastar energia.
5. Se a balança parar de funcionar, verifique o estado das pilhas.
6. Se as pilhas estiverem gastas, substitua-as por um conjunto novo de pilhas. Se alguma delas estiver com a polaridade trocada, coloque-a de forma correcta.
7. Mantenha a superfície da balança seca e evite lavá-la com água, para impedir que esta entre para dentro dos circuitos e os danifique.
8. Por favor não esmague a balança nem a deixe cair de sítios altos.
9. Remova as pilhas se a balança não for utilizada durante um período longo.
10. Esta balança é apenas para uso pessoal. Não a utilize para fins comerciais ou industriais.

O distribuidor das balanças "STEPON" em Portugal é  
SERTEC – Tecnologia Acessível

SERTEC – Tecnologia Acessível

Telefone: (+351) 219 435 183 ou 930 553 007

E-mail: [info@sertec.pt](mailto:info@sertec.pt)

Website: [www.sertec.pt](http://www.sertec.pt)

Morada: Rua Combatentes da Grande Guerra 51-B,  
1885-024 Moscavide, Portugal

Para estar a par de novidades, siga-nos em  
[facebook.com/electrosertec](https://facebook.com/electrosertec)



**RoHS**

